

TARJETA DE CONFIGURACIÓN DE EMERGENCIA PARA EL RESPIRADOR LTV[®] 1200

PARA ASISTENCIA
LAS 24 HORAS
1-800-754-1914




CardinalHealth

PASO 1 ELIJA UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



TRANSFORMADOR DE CA
(CUANDO ESTÉ DISPONIBLE,
UTILICE LA ALIMENTACIÓN DE CA)


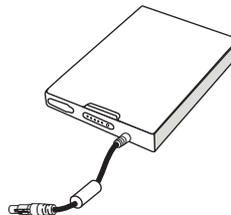


BATERÍA DE IONES DE LITIO




BATERÍA DE PLOMO Y ÁCIDO

PASO 2 CONECTE EL LTV A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

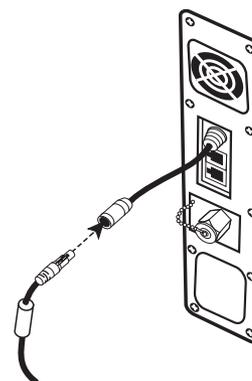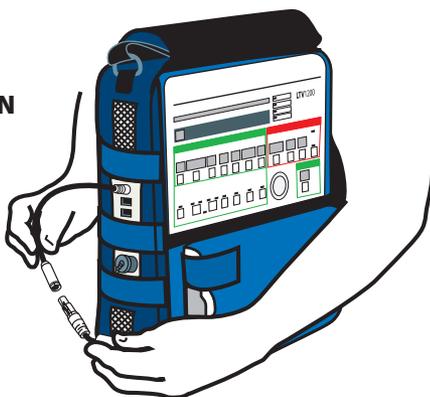

PASO 3 ELIJA UN CIRCUITO DE AIRE

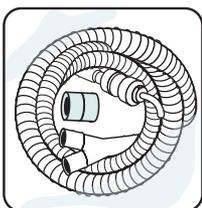


ABRA LA BOLSA
QUITE EL CIRCUITO DEL
PACIENTE Y EL
ADAPTADOR DE 22 mm
DE LA BOLSA.


CIRCUITO DEL HUMIDIFICADOR/ OPCIONAL




CIRCUITO DE PACIENTE **ADULTO**
>20 kg
>44 libras

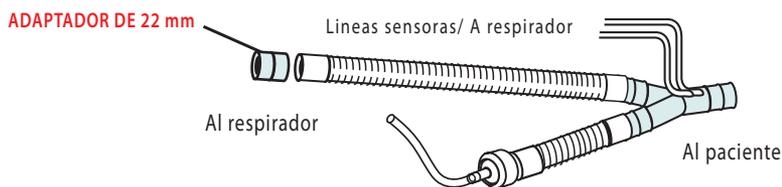

CIRCUITO DE PACIENTE **PEDIÁTRICO**
≤20 kg
≤44 libras

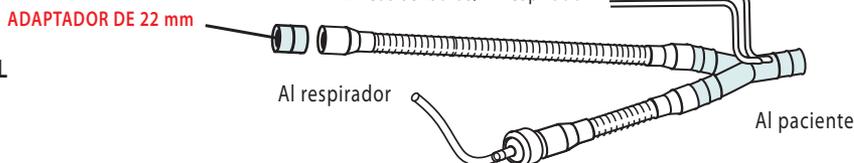


PASO 4 CONECTE EL CIRCUITO AL LTV


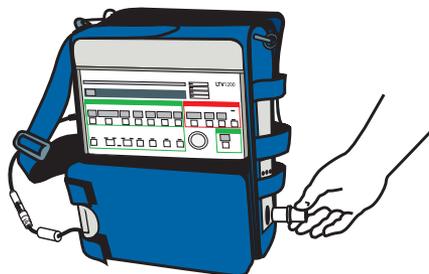


PASO A CONECTE EL ADAPTADOR DE 22mm (EN LA BOLSA DEL CIRCUITO)


PASO B CONECTE EL CIRCUITO AL ADAPTADOR DE 22mm

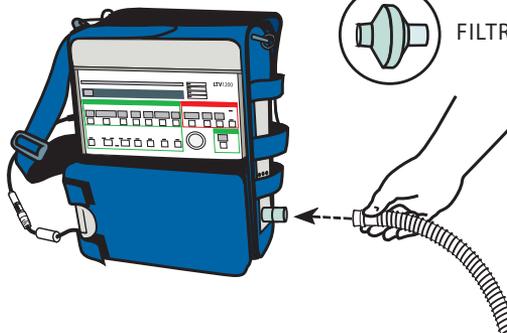


PASO 5 CONECTE LOS CABLES SENSORES AL LTV

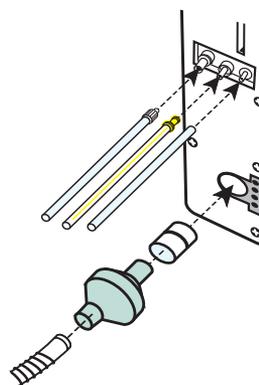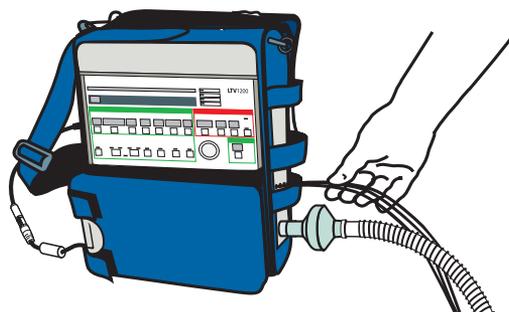

PASO 6 ENCIENDA EL RESPIRADOR LTV

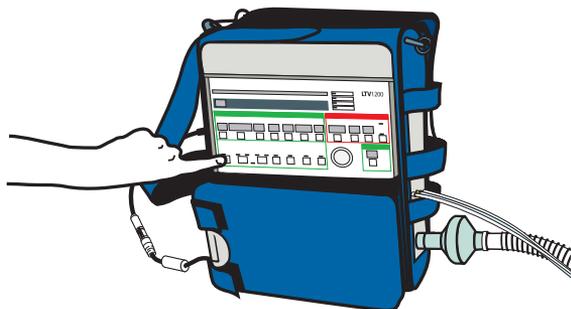


On/Standby

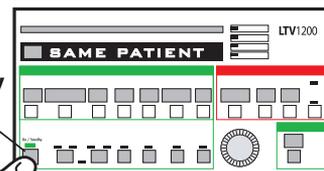

PASO 7 CONFIGURACIÓN DE PACIENTE



DESPUÉS DE ENCENDIDO, VEA LA PANTALLA **SAME PATIENT** (MISMO PACIENTE)

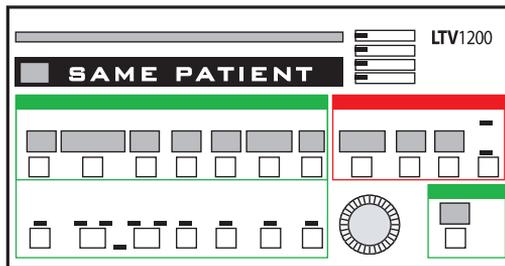

PASO 8 CONFIGURACIÓN DE NUEVO PACIENTE

PASO A GIRE LA SET VALUE KNOB (PERILLA DE DEFINICIÓN DE VALORES) EN SENTIDO HORARIO HASTA QUE SE MUESTRE **NEW PATIENT** (NUEVO PACIENTE)



PASO B PRESIONE SELECT CUANDO APAREZCA **NEW PATIENT**

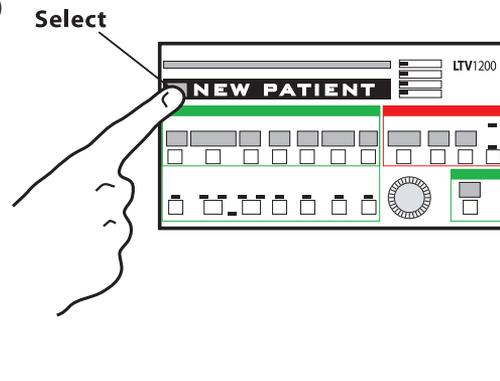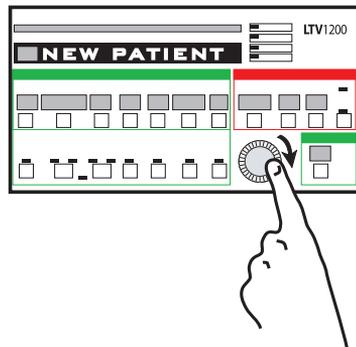

PASO 9 CONFIGURACIÓN DE TAMAÑO DEL PACIENTE

PASO A GIRE LA SET VALUE KNOB (PERILLA DE DEFINICIÓN DE VALORES) SEGÚN EL TAMAÑO CORRECTO DE PACIENTE. (NIÑO, PEDIÁTRICO O ADULTO)


PASO B PRESIONE SELECT CUANDO SE MUESTRE EL TAMAÑO CORRECTO DE PACIENTE

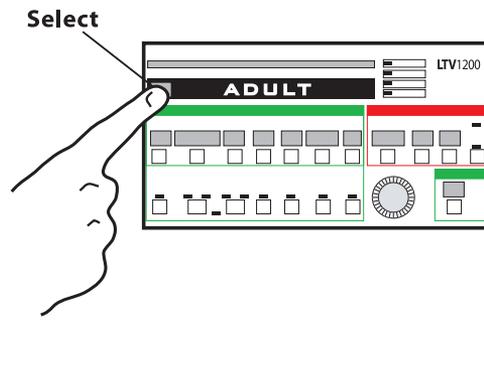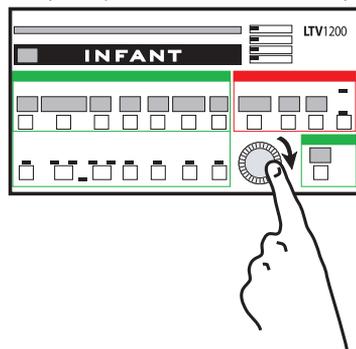


? ERROR

Si comete un error, mantenga presionado el botón ON/STANDBY durante 3 segundos para apagar el respirador LTV. Luego, regrese al paso 6.

PASO 10 CONECTE EL CIRCUITO AL TUBO ET O A LA MÁSCARA

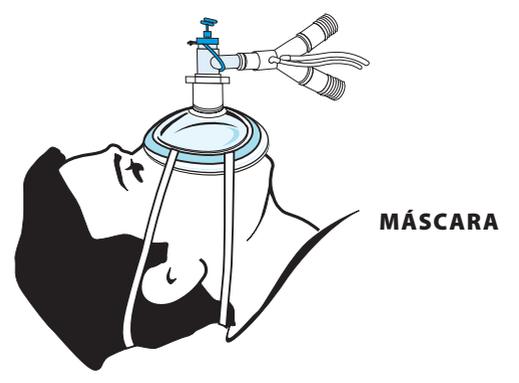

NOTA ! ALARMA NOTA: LA ALARMA DEL LTV® SE ACTIVARÁ HASTA QUE SE CONECTE EL RESPIRADOR AL PACIENTE. PUEDE PRESIONAR EL BOTÓN SILENCE/RESET (SILENCIO/RESTABLECER).

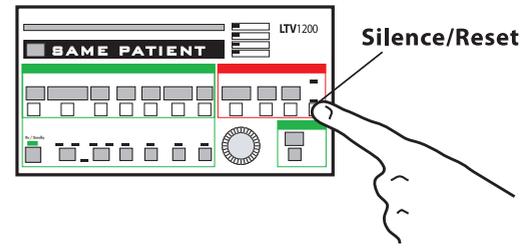


PASO 11 OPCIONAL//CON MÁSCARA


ELIJA UNA MÁSCARA (PEDIÁTRICA O ADULTO)




CONECTE EL CODO A LA MÁSCARA

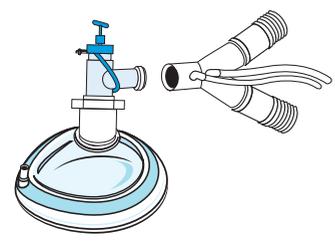

CONECTE AL PACIENTE

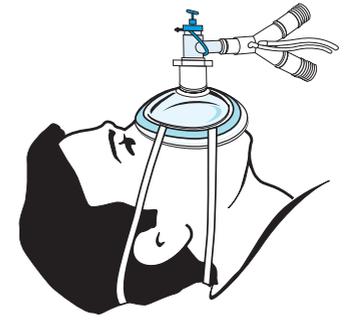

PASO 12 OPCIONAL // CON UN HME Y/O UN TUBO FLEXIBLE, COMO SE ILUSTRÁ, PARA COMODIDAD DEL PACIENTE

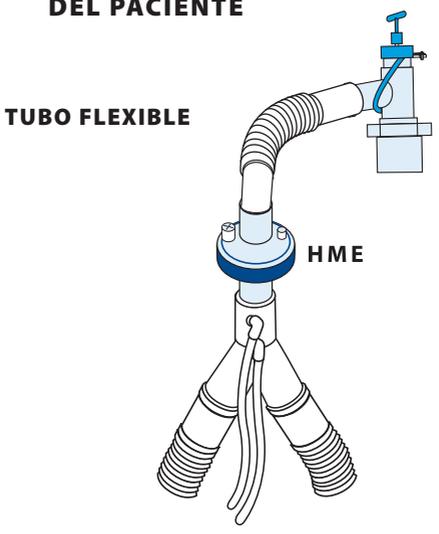

ESTA TARJETA DE CONFIGURACIÓN DE EMERGENCIA BRINDA INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA PARA LA CONFIGURACIÓN INICIAL DEL RESPIRADOR LTV 1200. SEGÚN EL ESTADO CLÍNICO DEL PACIENTE TAL VEZ SEA NECESARIO REGULAR LA CONFIGURACIÓN INICIAL. ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DEL RESPIRADOR EN EL MANUAL DEL OPERADOR DEL RESPIRADOR LTV 1200



Cardinal Health
Respiratory Care
17400 Medina Road, Suite 100
Minneapolis, MN 55447
Toll Free 800-754-1914
cardinalhealth.com/viasys